


## Pilleæske

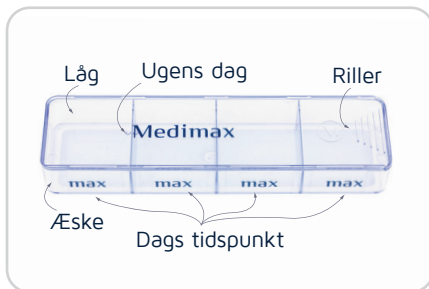

## Inden anvendelse!

- Vi anbefaler, at du vasker dine Medimax pilleæsker, inden du bruger dem første gang. De kan vaskes i hånden med almindeligt opvaskemiddel eller i en opvaskemaskine ved 50 °C.
- Vi anbefaler også at rengøre æskerne, inden du genfylder dem - specielt hvis der er ændringer i din medicin.
- Pilleæskerne skal opbevares utilgængeligt for børn.
- Husk at være ekstra opmærksom på eventuelle krav om opbevaring af din medicin. Noget medicin må ikke tages ud af den oprindelige emballage før det tages i brug. Der kan også være krav til opbevaring ift. temperatur, lysfølsomhed, eller andre krav. Hvis du er i tvivl, så spørg altid din apoteker eller læge.

1



- Tag æskerne ud af omslaget og tag låget af ved at glide det mod højre

2



- Læg din medicin i de relevante rum/æsker

3



- Sæt låget på igen. Låget er sikret, når det er skubbet helt mod venstre, og du mærker/hører et klik

4



- Træk låget til side, så det relevante rum åbnes
- Vip medicinen ud i hånden

5



- Skub låget tilbage igen til du hører et klik og låget er i lukket position

**Tip!** Du kan notere information om din medicin på det vedlagte medicinkort

6



**Tip!** Ekstra skillerum kan købes om nødvendigt