

Pilleæske



Inden anvendelse!

- Vi anbefaler, at du vasker dine Medinizer pilleæsker, inden du bruger dem første gang. De kan vaskes i hånden med almindeligt opvaskemiddel eller i en opvaskemaskine ved 50 °C.
- Vi anbefaler også at rengøre æskerne, inden du genfylder dem - specielt hvis der er ændringer i din medicin.
- Pilleæskerne skal opbevares utilgængeligt for børn.
- Husk at være ekstra opmærksom på eventuelle krav om opbevaring af din medicin. Noget medicin må ikke tages ud af den oprindelige emballage før det tages i brug. Der kan også være krav til opbevaring ift. temperatur, lysfølsomhed, eller andre krav. Hvis du er i tvivl, så spørg altid din apoteker eller læge.



- Tag æskerne ud af omslaget og fjern lågene helt




- Læg din medicin i de relevante rum/æsker



- Sæt låget på igen. Låget er sikret, når du mærker/hører et klik



- Træk låget til side, så det relevante rum åbnes
- Vip medicinen ud i hånden

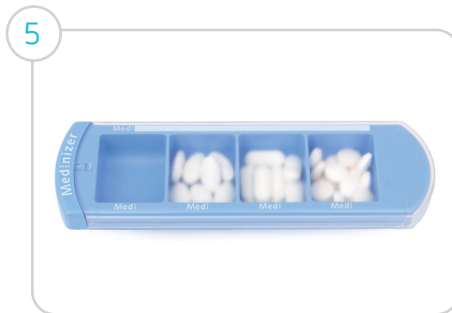

- Skub låget tilbage igen til du hører et klik og låget er i lukket position

Tip! Du kan notere information om din medicin på det vedlagte medicinkort



Tip! Under bunden af hvert rum er 1-4 fremspringende prikker til forbedret brugbarhed for brugere med nedsat synsevne